

PHILIPS

InnoSpire Go

Portable mesh nebulizer

Μειώνει το χρόνο θεραπείας κατά 25%¹

Φορητός, εύκολος στη χρήση του και κυριολεκτικά αθόρυβος νεφελοποιητής της Philips, με τεχνολογία δονούμενου πλέγματος. Έχει σχεδιαστεί ειδικότερα, για τη μείωση του χρόνου νεφελοποίησης, επιτρέποντας τον ασθενή να αξιοποιεί το χρόνο του ποιοτικά.

Φέρωντας την καθιερωμένη, κλινικά αποδεδειγμένη τεχνολογία δονούμενου πλέγματος, που υιοθετήθηκε από νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, ο νεφελοποιητής InnoSpire Go χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική χορήγηση όλων των κοινών εισπνεόμενων φαρμάκων.



Τόσο εύκολος όσο 1, 2, 3*...



1. Τοποθέτηση Φαρμάκου

Ανοίξτε το πράσινο καπάκι τοποθετήστε το φάρμακο και ο InnoSpire Go είναι έτοιμος προς χρήση.



2. Θεραπεία

Πατήστε το κουμπί και ο InnoSpire Go θα αρχίσει να νεφελοποιεί.



3. Καθαρισμός

Αφαιρέστε το επιστόμιο και ξεπλύνετε γρήγορα με χλιαρό νερό.

* Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης για πιο λεπτομερή πληροφόρηση.


Ο νεφελοποιητής InnoSpire Go είναι τόσο εύκολος στη χρήση ώστε να βοηθά τον ασθενή να διαχειρίζεται σωστά τη θεραπεία του.




Θεραπεία σε 4 λεπτά²
Αποτελεσματική θεραπεία επιτυγχάνεται με οπτικοακουστικούς δείκτες που σημαίνουν την ολοκλήρωση της θεραπείας πριν την αυτόματη παύση της συσκευής.



Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
Το μικρό μέγεθος του φορητού νεφελοποιητή δίνει τη δυνατότητα στην ασθενή να κάνει διακριτικά τη θεραπεία του, όσο συχνά χρειάζεται, όπου και αν βρίσκεται.

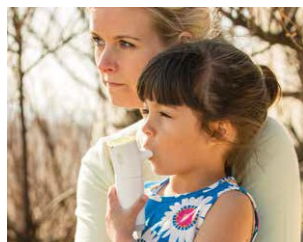

Ενσωματωμένη μπαταρία
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μακράς διάρκειας, για τουλάχιστον 30 θεραπείες πριν την επόμενη φόρτιση.

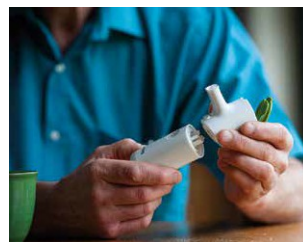

Απλή συναρμολόγηση
Εύκολα αποσπώμενο επιστόμιο, που καθιστά τον InnoSpire Go απλό στη χρήση³, στον καθαρισμό και στη συναρμολόγηση.

InnoSpire Go πληροφορίες αερολύματος	Σαλβουταμόλη	Βρωμιούχο Ιπρατρόπιο	Βουδεσονίδη
	2.5 ml	2 ml	2 ml
Μέση διάμετρος σταγονιδίων MMAD μm	3.99	3.93	4.84
Αναπνεύσιμο κλάσμα % σωματιδίων < 5 μm	64.4%	65.3%	52.1%
Χρόνος θεραπείας (min:sec)	4.18	3.44	3.34
Υπολοιπόμενος όγκος ml	0.3	0.2	0.3



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Μπαταρία	Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου μακράς διάρκειας για περίπου 30 θεραπείες
Διαστάσεις	7.0 εκ x 4.5 εκ x 13.5 εκ
Weight	111 γρ
Εγγύηση	Συσκευή 2 χρόνια Επιστόμιο 1 χρόνο

- Συγκριτικά με Aeroneb Go.
- Χρησιμοποιώντας 2.5ml σαλβουταμόλης.
- Διατίθεται με παιδική μάσκα σε περίπτωση δυσκολίας χρήσης του επιστομίου, από το παιδί.

Εισάγεται και διανέμεται στην Ελλάδα από την ALLERTEC HELLAS A.E.
Τ.:2310 488700 www.allertec.eu

